

Virustop®

Soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali

ISTRUZIONI PER L'USO

Virustop® soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali è indicato in caso di affezioni varie della mucosa vaginale, coadiuvante per il ripristino delle fisiologiche funzionalità della mucosa vaginale stessa.

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono: Acqua, Metisoprinolo g 3,3, Polisorbato 20, Imidazolidinil urea, Sodio metil-para-idrossibenzoato, Edta bisodico, Profumo Rosenol, Cetrimide, Acido lattico.

COME SI USA VIRUSTOP SOLUZIONE GINECOLOGICA PRONTA PER LAVANDE VAGINALI

Effettuare una lavanda al giorno, secondo indicazione medica.

Utilizzo della soluzione pronto uso: dopo essersi accuratamente lavate le mani compiere le seguenti operazioni. Con il pollice premere sul tappo provocandone la rottura, quindi applicare la cannula contenuta nel blister, premendo bene. Eseguire il lavaggio introducendo la cannula in vagina e premendo delicatamente il flacone, fino a completa fuoriuscita del liquido. Dopo l'applicazione non risciacquare.

È consigliabile che la paziente pratici l'irrigazione in posizione stesa o semiseduta, cercando di mantenere la soluzione per alcuni minuti nella vagina.

Il flacone e la cannula sono monouso, non riutilizzabili.

Non utilizzare la cannula in dotazione in soggetti pediatrici.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE

L'uso di **Virustop®** soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali non richiede particolari precauzioni.

Non usare **Virustop®** soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali in casi di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto.

In gravidanza accertata o presunta l'impiego di **Virustop®** soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali deve avvenire solamente dietro consiglio del proprio medico curante o del farmacista.

Utilizzare su mucosa integra.

Non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad altri dispositivi o farmaci per uso vaginale.

L'uso prolungato del prodotto può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali; ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.

La comparsa di effetti indesiderati diversi da quelli descritti deve essere segnalata al proprio medico curante o al farmacista.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

• Virustop soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali è per uso vaginale; non ingerire.

• Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sull'astuccio e sul flacone.

• Non utilizzare il prodotto in caso in cui il flacone e/o la cannula risultino non integri.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare la confezione in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore.

CONFEZIONE

5 flaconi da 140 ml

ULTIMA REVISIONE: Aprile 2021

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.



Difass International S.r.l.

Via Ausa, 181 - 47853 Cerasolo di Coriano (RN)
www.difass.com

DISPOSITIVO MEDICO

PAP 22 R. 06-0421

Vuoi avere maggiori informazioni sui nostri prodotti?



Visita il sito
www.difass.com




Difass International srl

Via Ausa, 181 • Loc. Cerasolo • 47853 Coriano (RN)
Tel. 0541.1780101 • Fax 0541.1780115
info@difass.com • www.difass.com



BioDue s.p.a.

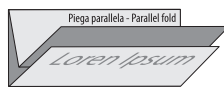

Data

20/04/2021

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DIMENSIONI APERTO	FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DIMENSIONI CHIUSO	FRONTE/RETRO	PRODOTTO / CLIENTE	COLORI
100x150 mm	100x37,5 mm	SI	VIRUSTOP LAVANDA	NERO

Rev. 02-1009 Cambio istruzioni per cannule - Rev. 00-0211 Passaggio difass international - Rev. 01-1111 Cambio indirizzo difass prato - Rev. 02-1012 Tolto "distributore: difass s.r.l." + correzione in come si usa e precauzioni misure precauzionali+ inserite modalità+ tolto validità+ nuove indicazioni - Rev. 03-0713 aggiunta in avvertenze - Rev. 04-0517 agg. nuovo impianto - Rev. 05-0118 agg. ind. e impianto - R. 06-0421 agg. impianto